

ENHORABUENA por su compra de “GLOBAL 360”. Este producto de calidad está diseñado para gente que necesita una ayuda especial para levantarse, ofrece la característica especial de temporizador con cuenta atrás para la repetición automática.

ANTES de usar su unidad, tómese unos instantes para leer estas instrucciones. Entender sus características le permitirá ajustarlo mejor y asegurar un uso eficaz.

FUENTE DE ENERGÍA: Fuente de energía y enchufe con adaptador universal incluidos

1) Introduzca el pequeño tubo del enchufe de la fuente de energía (Salida: DC 12V, 1000 mA; Entrada 100-240 Volt 50-60 Hz) en el enchufe hembra en la parte trasera del reloj, donde pone adaptador 12V DC.

2) Conecte la fuente de energía al adaptador que necesita para la electricidad.

3) Enchufe junto a la mesilla de noche.

Nota: 12:00 parpadeará en la pantalla del reloj.

Cuando configure la hora, la pantalla dejará de parpadear.

PILA DE REPUESTO: CR2032 Pila de botón incluida

Si fallara la electricidad, el reloj seguirá dando la hora y la alarma seguirá conectada para la hora escogida y la cuenta atrás. La pantalla del reloj no se iluminará para ahorrar energía.

Nota: Si la electricidad se corta durante mucho tiempo, quizá tenga que ajustar la hora del reloj después de que vuelva la corriente.

Para activar la función de pila de repuesto, abra la compuerta circular de pila debajo del reloj. Para ello, gire el contador en sentido de las agujas del reloj y quite el plástico protector.

Nota: Sustituya la pila cuando haga falta. La vida útil de la pila CR2032 es de aproximadamente 2 años.

CÓMO AJUSTAR LA HORA

1) Deslice el interruptor de **CONFIGURAR EL MODO** a la posición de **“HORA”**.

2) Mantenga pulsado el botón **“CONFIGURAR”** y pulse el botón **HORA** para configurar la hora.

Nota: Cuando use el modo de 12 horas, sírvase de la luz indicadora de PM que está en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando la hora sea PM, la luz estará encendida. Cuando la hora sea AM, la luz estará apagada.

3) Mantenga pulsado el botón **“CONFIGURAR”** y pulse el botón **MINUTOS**

para configurar los minutos. **SELECCIONE LA OPCIÓN DE 12 HORAS (AM/PM) O 24 HORAS.**

1) Deslice el interruptor de **CONFIGURAR EL MODO** a la posición de **“HORA”**.

2) Mantenga pulsado el botón **“CONFIGURAR”** y pulse el botón **INICIAR/PARAR** para configurar el formato que quiera.

SELECCIONE EL MODO DE

ALERTA: Vibrar, sonar o ambos

Deslice el interruptor del MODO DE ALERTA (interruptor de 3 posiciones en el lado izquierdo del reloj) para seleccionar las alertas que quiera para la alarma y la cuenta atrás.

VIBRAR activa la vibración de la cama.

AUDIO activa el sonido.

AMBOS activa el audio y la vibración. Cuando use la alerta AUDIO, se puede ajustar el sonido.

Deslice el interruptor **AUDIO** en la parte superior del reloj y póngalo en **ALTO** o **BAJO**.

VIBRACIÓN DE LA CAMA:

Con la alarma o la cuenta atrás activados, la vibración de la cama se podrá activar también.

1) Introduzca el mini-enchufe de tubo del cable del vibrador de la cama en el enchufe de la trasera del reloj, donde pone **BEDSHAKER** y ponga el vibrador de la cama bajo la almohada o colchón.

2) Deslice el interruptor del **MODO DE ALERTA** (interruptor de 3 posiciones

en el lado izquierdo del reloj) para seleccionar **VIBRAR** o **AMBOS**.

3) Deslice el interruptor de **ALARMA/CUENTA ATRÁS** (interruptor de 4

posiciones a la derecha del reloj) a la posición **AMBOS ENCENDIDOS**.

4) Pulse el botón de **INICIAR/PARAR** para interrumpir la alerta manualmente. **ALARMA**

• *La(s) alarma(s) configuradas (VIBRACIÓN, AUDIO o AMBAS) saltarán*

cuando llegue la hora.

• *Las alarmas activadas se pueden interrumpir manualmente pulsando el botón de INICIAR/PARAR cuando la pantalla del reloj está en cualquier MODO. (HORA, ALARMA, o CUENTA ATRÁS) o se parará automáticamente pasados unos 20 minutos.*

• *La configuración de la hora de la alarma se quedará activada para las alarmas diarias y se puede apagar para los días en que no se quiera usar con el interruptor ALARMA/CUENTA ATRÁS.*

CÓMO CONFIGURAR LA HORA DE LA ALARMA

1) Deslice el interruptor de **CONFIGURAR EL MODO** a la posición de **“ALARMA”**.

2) Mantenga pulsado el botón **“CONFIGURAR”** y pulse el botón **HORA** para configurar la hora.

Nota: Cuando use el modo de 12 horas, sírvase de la luz indicadora de PM que está en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando la hora sea PM, la luz estará encendida. Cuando la hora sea AM, la luz estará apagada.

3) Mantenga pulsado el botón **“CONFIGURAR”** y pulse el botón **MINUTOS**

para configurar los minutos.

Nota: El indicador de luz ALARMA azul (en la esquina inferior izquierda de la pantalla) se verá.

La hora de la alarma quedará configurada y se activará todos los días a la misma hora a no ser que se apague o cambie manualmente.

CÓMO COMPROBAR LA HORA DE LA ALARMA

Deslice el interruptor de **CONFIGURAR EL MODO** a la posición de **“ALARMA”**. *Verá la hora de la alarma establecida en la pantalla.*

APAGAR LA ALARMA

Deslice el interruptor de **ALARMA/CUENTA ATRÁS** (interruptor de 4 posiciones a la derecha del reloj) para **APAGAR LA ALARMA** o **APAGAR LOS DOS** para días en los que no quiera despertarse con la alarma.

La alarma quedará configurada para un futuro.

Nota: El indicador de luz ALARMA azul no se verá en la pantalla.

CÓMO USAR EL REPETIDOR

Puede pulsar el botón de REPETICIÓN para parar la alarma y se repetirá automáticamente pasados unos 9 minutos. Se puede repetir una y otra vez.

Después de activar la alarma, pulse el botón **REPETIR** para parar la alerta (audio, vibración o ambos).

Nota: El indicador de luz ALARMA azul parpadeará.

CUENTA ATRÁS

• *Programa la cuenta atrás para los minutos u horas que quiera, con un máximo de 23 horas y 59 minutos.*

• *La(s) alarma(s) configuradas (VIBRACIÓN, AUDIO o AMBAS) saltarán*

cuando la cuenta atrás llegue a “00.00”.

• *Las alarmas activadas se pueden interrumpir manualmente pulsando el botón de INICIAR/PARAR cuando la pantalla del reloj está en cualquier MODO. ((HORA, ALARMA, o CUENTA ATRÁS) o se parará automáticamente.*

Nota: La característica de interrupción automática parará la(s) alerta(s) automáticamente al cabo de unos 30 minutos si se configura la cuenta

atrás para más de 31 minutos; al cabo de unos 5 minutos si se configura para 6-30 minutos; y al cabo de unos 30 segundos si se configura para 1-5 minutos.

• **El tiempo programado se repetirá automáticamente cada vez que la cuenta atrás llegue a “00.00” a menos que se apague manualmente.**

CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA ATRÁS:

1) Deslice el interruptor de **CONFIGURAR EL MODO** a la posición de “**CUENTA ATRÁS**”.

2) Mantenga pulsado el botón “**CONFIGURAR**” y pulse el botón

HORA

para configurar la hora.

3) Mantenga pulsado el botón “**CONFIGURAR**” y pulse el botón

MINUTOS

para configurar los minutos.

*Nota: El indicador de luz **ALARMA verde** (en la esquina inferior derecha de la pantalla) se verá.*

4) Pulse el botón de **INICIAR/PARAR** para iniciar la cuenta atrás.

*Nota: El indicador de luz **ALARMA verde** parpadeará.*

La pantalla mostrará la cuenta atrás de segundos cuando la hora llegue al último minuto.

Cómo dejar la cuenta atrás a cero:

1) Pulse el botón de **INICIAR/PARAR** para parar la cuenta atrás.

2) Pulse el botón **CONFIGURAR** y la última hora configurada se verá en la pantalla.

3) Para poner a cero, sírvase de los botones “**CONFIGURAR**”, **HORA** y **MINUTOS** como dice arriba.

CÓMO COMPROBAR LA CONFIGURACIÓN DE LA HORA DE LA CUENTA

ATRÁS:

1) Deslice el interruptor de **CONFIGURAR EL MODO** a la posición de “**CUENTA ATRÁS**”. Verá la hora de la cuenta atrás establecida en la pantalla.

2) Mantenga pulsado el botón

INICIAR/PARAR y después **CONFIGURAR**

para ver la hora original configurada.

3) Pulse el botón de **INICIAR/PARAR**

para seguir con la cuenta atrás el tiempo que quede.

PARAR LA REPETICIÓN DE LA CUENTA ATRÁS:

1) Deslice el interruptor de **CONFIGURAR EL MODO** a la posición de “**CUENTA ATRÁS**”.

2) Pulse el botón **INICIAR/PARAR** una vez o si las alarmas (vibración, audio o ambas) están activadas, pulse

INICIAR/PARAR dos veces para

interrumpir

la cuenta atrás.

APAGAR LA CUENTA ATRÁS:

Deslice el interruptor de **ALARMA/CUENTA ATRÁS** (interruptor de 4 posiciones

a la derecha del reloj) para **APAGAR LA CUENTA ATRÁS** o **APAGAR LOS**

DOS para días en los que no quiera que salte la cuenta atrás.

La cuenta atrás quedará configurada para un futuro.

*Nota: El indicador de luz **ALARMA verde** no se verá en la pantalla.*

RESETEAR:

*Antes de enviar su reloj a reparar, intente resetearlo con el botón **RESET**.*

1) Use un objeto puntiagudo para pulsar el botón en la hendidura, donde pone **RESET**, en la parte trasera del reloj, hasta que la pantalla se quede en blanco.

2) Cuando aparezca 12:00 en la pantalla, resetee la hora, la alarma y la cuenta atrás.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

“**GLOBAL 360**” se ha diseñado y producido con mimo para ofrecerle precisión y fiabilidad. Estas sugerencias le ayudarán a cuidar de su reloj/cuenta atrás para sacarle el máximo partido. Mantenga el reloj seco. Si se moja, séquelo con un trapo inmediatamente.

Los líquidos pueden contener minerales que corroen los circuitos eléctricos.

Use sólo una pila nueva del tamaño y tipo recomendados. Saque siempre

las pilas estropeadas o viejas. Podría tener una fuga de químicos que dañan los circuitos electrónicos.

Maneje el reloj con cuidado. Si se le cae, se podrían dañar los circuitos y la carcasa y hacer que no funcione bien.

Use y guarde el reloj sólo en temperaturas normales. Las temperaturas

extremas pueden reducir la vida útil de los aparatos electrónicos y distorsionar o derretir las partes de plástico.

Mantenga el reloj alejado del polvo y la suciedad, que podrían desgastar las partes demasiado pronto.

Seque el reloj con un trapo húmedo de vez en cuando para que siga pareciendo nuevo. No use químicos fuertes,

disolventes de limpieza o detergentes fuertes

para limpiar el reloj.

Modificar o forzar los componentes

internos podría causar el mal funcionamiento

del reloj y además invalidará la garantía.

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Se garantiza que el “**GLOBAL 360**” está libre de defectos de material y manufactura durante un periodo de un año

a partir de la fecha de venta al cliente. Es una garantía limitada que sólo

cubre las funciones. La garantía se anula si se han forzado las partes,

alterado, maltratado o sujeto a condiciones extremas para las que no se diseñó, o reparado fuera de un centro de servicio

calificado. **GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC** puede elegir sustituir una unidad en vez de repararla, a su libre albedrío.

Durante el periodo de garantía, devuelva el producto, con el comprobante

de compra fechado, en un paquete seguro, asegurado y con los gastos de

envío prepagados. No se aceptarán paquetes contra reembolso. Por favor incluya una nota que describa en detalle por

qué lo devuelve, cuál es su

dirección e incluya \$9.95 (cheque, giro postal, Visa, MasterCard, American Express o Discover) para envío y gestión en EEUU.

Para otros países, póngase en contacto con nosotros para saber el precio.

ARREGLO FUERA DE GARANTÍA

Siga el mismo procedimiento de envío que usaría para un arreglo dentro de garantía. Asegúrese de incluir una descripción del problema. Se enviará un

presupuesto para que apruebe el arreglo o las partes que no estén cubiertos

por la garantía antes de llevar a cabo cualquier trabajo.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD:

En ningún caso Global Assistive Devices Inc será responsable de cualquier

daño especial, accidental, indirecto o consecuencia de, incluyendo, pero sin

limitarse a, daños por pérdida de la propiedad, daños personales, pérdida

de privacidad, no pagado aduanas, negligencia o cualquier otra pérdida,

como fuera que se causara, aunque Global conociera la posibilidad de estos daños. Esta renuncia de responsabilidad se

aplica a daños que incluyen, pero no están limitados a, aquellos causados por fallos de rendimiento del producto.

La responsabilidad por la selección, seguridad e idoneidad de cualquier

producto es del consumidor. Las circunstancias o consecuencias que deriven

o estén de cualquier forma relacionadas con el uso o la incapacidad de usar

nuestros productos es responsabilidad del consumidor. Global Assistive Devices, Inc. no podrá hacerse responsable de ninguna manera. Cuando un

accesorio no producido por **GLOBAL** se usa junto a este producto, **GLOBAL** no aceptará responsabilidad alguna por el

rendimiento o mal funcionamiento del producto conectado o "GLOBAL 360". **GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.**

Oakland Park, FL USA 33334

www.GlobalAssistive.com

“Global 360” es una marca registrada de GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.