

Vibra LITE 12

カレンダーモード

- ✓時刻(時分秒)とカレンダー(最大3タイムゾーンでの年月日と曜日)を設定して表示します。
- ✓タイムゾーンをタイムゾーン1・2・3の中から選択してスクリーンに表示することができます。
注: 予め設定したアラームはスクリーンに表示するように設定したタイムゾーンに従って鳴ります。
- ✓時間表示形式を選択します。
12時間 = AM/PM 表示
24時間 = 24時間表示
注: 選択した時間表示形式は3つの全てのタイムゾーンに自動的に適用されます。
- ✓日付表示形式(月/日・曜日または日・曜日/月の順)を選択します。

注: 選択した日付表示形式は 3 つの全てのタイムゾーンに自動的に適用され
ます。

カレンダーモード画面上の略語:

T-ZONE = タイムゾーン、hr = 時間、MM = 月、DD = 曜日/日、SU = 日曜日、MO
= 月曜日、TU = 火曜日、WE = 水曜日、TH = 木曜日、FR = 金曜日、SA = 土
曜日

カレンダーモードの設定:

- 1) MODE ボタンを押して画面をカレンダーモードにします。
- 2) 画面上部に「T-ZONE」と表示されるまで SET/RST ボタンを長押しします。ス
クリーン下部に「1」「2」「3」のいずれかの数字が点滅します。
- 3) ST/STP ボタンを使用して設定するタイムゾーンを選択します。
- 4) MODE ボタンを押します。時間の桁が点滅します。
- 5) ST/STP ボタンを押して時間を設定します。注: 12 時間表示を使用している場
合は、設定時刻が午後の時は PM アイコンが画面左のボックス内に表示され
ます。設定時刻が午前の場合はボックス内には何も表示されません。
- 6) MODE ボタンを押します。分の桁が点滅します。

- 7) ST/STP ボタンを押して分を設定します。
- 8) MODE ボタンを押します。秒の桁が点滅します。
- 9) ST/STP ボタンを押し、必要に応じて秒の桁をゼロ (00) に設定します。
- 10) MODE ボタンを押します。曜日/日が点滅します。
- 11) ST/STP ボタンを押して曜日/日を設定します。(1-31)
- 12) MODE ボタンを押します。月の桁が点滅します。
- 13) ST/STP ボタンを押して月を設定します。(1-12)
- 14) MODE ボタンを押します。年の下 2 桁が点滅します。
- 15) ST/STP ボタンを押して年を設定します。
- 16) MODE ボタンを押します。「12」または「24」の数字が点滅します。(「12」は 12 時間表示 (AM/PM 表示) を指し、「24」は 24 時間表示を指しています。)
- 17) ST/STP ボタンを押して時間表示形式を設定します。
- 18) MODE ボタンを押します。「MM:DD」または「DD:MM」の文字が点滅します。
(「MM:DD」は月/日・曜日の順、「DD:MM」は日・曜日/月の順で表示されます。)
- 19) ST/STP ボタンを押して日付表示形式を設定します。
- 20) SET/RST ボタンを押して設定した情報を保存します。

注:カレンダーモードの設定時に、設定が中断されたりボタン操作が2分間なかった場合は、点滅が停止してスクリーンに表示されている設定が保留になります。1)と2)の手順を繰り返し、必要に応じて他の手順を行って設定を終了します。

カレンダーモードの表示タイムゾーンを選択する:

- 1) カレンダーモードにし、スクリーン上部に「T-ZONE」と表示されるまで SET/RST ボタンを長押しします。スクリーン下部に「1」「2」「3」のいずれかの数字が点滅します。
- 2) ST/STP ボタンを使用して表示するタイムゾーンを選択します。
- 3) SET/RST ボタンを押して選択したタイムゾーンの表示を決定します。

他のタイムゾーンを見る:

カレンダーモードにし、ST/STP ボタンを押すと、現在表示されていない2つのタイムゾーンを順番に表示することができます。約5秒間ボタン操作がなかった場合は、スクリーンは自動的に設定されている表示タイムゾーンに戻ります。

アラームモード:

デイリーアラームが12まで設定できます。

- ✓ アラームは作動してから約 20 秒後に自動的に停止します。作動したアラームは ST/STP ボタンを 1 回押して手動で停止させることができます。
- ✓ アラームはオプションモードで設定したアラート(サウンド、バイブレーション、サウンド & バイブ)によって作動します。
- ✓ 設定したアラームは、カレンダーモードで設定した表示タイムゾーンに従って毎日作動します。

アラームモード・スクリーン上の略語: ALM = アラーム

アラームモードの設定:

- 1) 「ALARM」と表示されるまで MODE ボタンを押します。約 2 秒後に「ALM-01」と表示されます。
アラーム 1 ON
- 2) 「01」の数字が点滅するまで SET/RST ボタンを長押しします。
- 3) ST/STP ボタンを使用して設定するアラーム(01～12)を選択します。
- 4) MODE ボタンを押します。時間の桁が点滅します。
- 5) ST/STP ボタンを押して時間を設定します。

注:12 時間表示を使用している場合は、設定時刻が午後の時は PM アイコンがスクリーン左側のボックス内に表示されます。設定時刻が午前の場合はボックス内には何も表示されません。

- 6) MODE ボタンを押します。分の桁が点滅します。
- 7) ST/STP ボタンを押して分を設定します。
- 8) SET/RST ボタンを押して設定した情報を保存するか、次のアラームに進みます。次のアラームに進むには、分の桁が点滅している間に MODE ボタンを押し、次に ST/STP ボタンを押します。4)～8)の手順を繰り返します。

注:アラームモードの設定時に、設定が中断されたりボタン操作が2 分間なかった場合は、点滅が停止してスクリーンに表示されている設定が保留になります。それから2 分以内にボタン操作がない場合は、スクリーンが自動的にカレンダーモードに戻ります。

アラームを ON/OFF にする:

- 1) 「ALARM」と表示されるまで MODE ボタンを押します。約 2 秒後に「ALM-01」と表示されます。
- 2) ST/STP ボタンで ON/OFF にしたいアラーム(01～12)を選択します。

3) ST/STP ボタンを押して選択したアラームの変更を行います。

注:アラームが ON の場合は、スクリーン右側の 2 つ目のボックス内に「ON」と表示されます。アラームが OFF の場合はスクリーン下部に「OFF」と表示されます。

注:全てのアラームを停止または作動させたい場合は、「オプションモード」を参照して、バイブレーションおよびサウンドを OFF または ON にします。

クロノグラフ(ストップウォッチ)モード:

✓ 23 時間 59 分 59 秒までカウントアップが可能です。

✓ シングルイベント、タイムアウト(休止)、スプリットタイム機能があります。

クロノグラフモードスクリーン上の略語:

CHRONO = クロノグラフ

クロノグラフ:

1) スクリーン上部に「CHRONO」と表示されるまで MODE ボタンを押します。約 2 秒後に、スクリーン下部に「0'00"00」と表示されます。

「0'00"00」以外が表示された場合で、タイマーがカウントアップを行っている場合は ST/STP ボタンを押してタイマーを停止します。タイマーが停止したら、SET/RST ボタンを押します。

- 2) ST/RST ボタンを押してカウントアップを開始します。スクリーンの中央のボックス内のアイコンが点滅します。
- 3) ST/STP ボタンを押してタイマーを停止して経過タイムを記録します。
- 4) ST/STP ボタンを押して測定を再開します。

クロノグラフのスプリットタイム機能:

- 1) 上記のように、タイム表示を「0'00"00」にリセットします。
- 2) ST/RST ボタンを押してカウントアップを開始します。
- 3) SET/RST ボタンを押すと、スクリーンがフリーズします。内部タイマーがカウントアップを行っているので経過タイムは記録されますが、タイムは表示されません。
- 4) SET/RST ボタンをもう一度押すと、合計の経過タイムが表示されます。(カウントアップは継続されます。)

注:スクリーンはクロノグラフモードのままになります。MODE ボタンを押してスクリーンをカレンダーモードにします。

タイマーモード:

- ✓ 2つのタイマーで 23 時間 59 分 59 秒までカウントアップが可能です。カウントダウンがゼロ (0:00 00) に達すると、設定したアラートが作動し、自動的に停止します。タイマー 1 のアラート作動時間は 5 秒です。タイマー 2 のアラート作動時間は 10 秒です。作動したアラートは ST/STP ボタンを 1 回押して手動で停止させることができます。
- ✓ アラートは、サウンド、バイブレーション、サウンド&バイブから設定可能です。(サウンドとバイブレーションはオプションモードで ON/OFF にします。)
- ✓ リピートのオプションを ON/OFF にすることができます。リピートが ON になっている場合は、タイマーがゼロ (0:00 00) になった時点で設定しているカウントダウンタイムが自動的にリピートされます。リピートの回数がスクリーン上部に表示されます。(最大 99 回^{リピート ON}。それ以降は 0 に戻ります。)

注:30 秒未満のカウントダウンタイムのリピートを ON にしている場合、アラートは約 1 秒間作動し、その後自動的に停止します。

- ✓ リマインドのオプションを ON/OFF にすることができます。リマインドが ON になっている場合は、残り(ゼロまで)10 分、5 分、30 秒の時点でアラートが作動します。

タイマーモードスクリーン上の略語: TMR = タイマー、REP = リピート

タイマーの設定:

- 1) MODE ボタンを押して、スクリーン上部に表示するタイマーを「TIMER1」または「TIMER2」から選択します。

約 2 秒後に、「TMR-1」(タイマー 1)または「TMR-2」(タイマー 2)が表示されます。

- 2) 時間の桁が点滅するまで SET/RST ボタンを長押しします。
- 3) ST/STP ボタンを押して時間を設定します。
- 4) MODE ボタンを押します。分の桁が点滅します。
- 5) ST/STP ボタンを押して分を設定します。
- 6) MODE ボタンを押します。秒の桁が点滅します。
- 7) ST/STP ボタンを押して秒を設定します。
- 8) MODE ボタンを押します。スクリーン上部に「REPEAT」と表示され、スクリーン下部に「ON」または「OFF」が点滅します。

- 9) ST/STP ボタンを使用してリピートの ON/OFF を選択します。
- 10) MODE ボタンを押します。スクリーン上部に「REMIND」と表示され、スクリーン下部に「ON」または「OFF」が点滅します。
- 11) ST/STP ボタンでリマインドの ON/OFF を選択します。
- 12) SET/RST ボタンを押して設定した情報を保存します。

注: カウントダウンタイマーの設定時に、設定が中断されたりボタン操作が2分間なかった場合は、点滅が停止してスクリーンに表示されている設定が保留になります。

2)の手順を繰り返し設定を終了し、必要に応じて進んでください。

スクリーンはカウントダウンタイマーのままになります。MODE ボタンを押してスクリーンをカレンダーモードにします。

カウントダウンタイマーを開始/停止する:

- 1) カウントダウンモードスクリーンを選択し、ST/STP ボタンを押してカウントダウンを開始します。スクリーンの中央のボックス内のカウントダウンタイマーアイコンが点滅します。
- 2) ST/STP ボタンを押してカウントダウンを停止します。タイマーの残り時間が表示されます。

注: カウントダウンタイマーがリピートに設定されており、アラートが作動している場合は、ST/STP ボタンを2回押すとカウントダウンが停止します。

3) ST/STP ボタンを押してカウントダウンを再開します。

カウントダウンタイムのクイックリセット:

- 1) 前回設定したカウントダウンタイムがスクリーンに表示されるまで SET/RST ボタンを長押しします。
- 2) ST/STP ボタンを押して前回設定したタイムを再開します。

オプションモード:

- ✓ バイブレーションとサウンドのアラートを ON/OFF にすることができます。アラートが ON になっている場合は、予め設定されているデイリーアラーム、カウントダウンタイマー、時報、ボタン押下時にアラートが作動します。
- ✓ 時報を ON にすると、毎時に短くアラートが作動します。(バイブレーション、サウンド、バイブレーション&サウンド) *注: 時報はカレンダーモードで設定した表示タイムゾーンに従って作動します。*
- ✓ ボタンアラートを ON にすると、MODE ボタンまたは ST/STP ボタンが押される度に現在のアラート設定(バイブレーション、サウンド、バイブレーション&サウンド)を認識します。

オプションモードスクリーン上の略語: VIBRA = バイブレーション

オプションモードの設定:

- 1) スクリーン上部に「OPTION」と表示されるまで MODE ボタンを押します。約 2 秒後に「VIBRA」と表示されます。スクリーン下部に「ON」または「OFF」が点滅します。
- 2) 「ON」または「OFF」が点滅するまで SET/RST ボタンを長押しします。
- 3) ST/STP ボタンでバイブレーションの ON/OFF を選択します。
- 4) MODE ボタンを押します。スクリーン上部に「SOUND」と表示されます。スクリーン下部に「ON」または「OFF」が点滅します。
- 5) ST/STP ボタンでサウンドの ON/OFF を選択します。
- 6) MODE ボタンを押します。スクリーン上部に「HOURLY」と表示されます。スクリーン下部に「ON」または「OFF」が点滅します。
- 7) ST/STP ボタンで時報の ON/OFF を選択します。
- 8) MODE ボタンを押します。スクリーン上部に「BUTTON」と表示されます。スクリーン下部に「ON」または「OFF」が点滅します。
- 9) ST/STP ボタンでボタンシグナルの ON/OFF を選択します。
- 10) SET/RST ボタンを押して設定した情報を保存します。

注:オプションモードの設定時に、設定が中断されたりボタン操作が2分間なかった場合は、点滅が停止してスクリーンに表示されている設定が保留になります。

それから2分以内にボタン操作がない場合は、スクリーンが自動的に“カレンダーモード”に戻ります。

現在のオプションモード設定を見る:

- 1) スクリーン上部に「OPTION」と表示されるまで MODE ボタンを押します。約 2 秒後に「VIBRA」と表示されます。バイブレーションが ON になっている場合は、スクリーン下部に「ON」が表示されます。OFF の場合は「OFF」と表示されます。
- 2) ST/STP ボタンを繰り返し押すと現在のオプションモードの設定を見ることができます。（「SOUND」、「HOURLY」、「BUTTON」）

EL ライト: (バックライト点灯)

LIGHT ボタンを押すとバックライトが点灯します。バックライトが約 3 秒間点灯した後、別のボタンの操作がなかった場合は自動的に消灯します。3 秒以内に別のボタンを操作すると、バックライトはそのまま点灯します。

電池:

標準の 3V リチウム電池 CR2032 が必要です。防水性を保つため、電池は資格を持つ技術者によって交換する必要があります。電池の寿命はバイブレーション機能および EL ライトの使用頻度により異なります。

重要な注意事項:

VibraLITE 製品は水泳やダイビング中、またはシャワー時の使用に対応していません。ご自分で電池を交換しないでください。どのような場合でも、電池交換は管理された環境で資格を持った技術者によって実施されなければなりません。購入日の証明として、レシートの原本の保管しておくことをおすすめします。

1 年限定保証:

お買い上げの VibraLITE 12 製品の保証期間はご購入日から 1 年間です。材料部品面または技術面での欠陥不良を保証いたします。この保証は時計の機能のみに限定されています。日常の使用により磨耗する電池、バンド、ケース、ガラス部分には適用されません。本保証は、改造や乱用、設計で意図されていないされていない環境での使用、正規のサービスセンター以外での修理に起因する損傷は対象としません。GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC. は、独自の判断で交換または修理のいずれかを選択するものとします。保証期間内に、購入日

の証明となる書類を添付の上、時計をしっかりと梱包して返却してください。その際には、保険をかけて送料前払いにてご送付ください。着払いの荷物は受け付けません。必要な修理についての説明と返送先住所を記載の上、アメリカ国内においては、送料手数料として\$9.95 (チェック、マネーオーダー、またはクレジットカード詳細(Visa、Master Card、American Express、Discover) を同封してください。その他の国の手数料に関してはお問合せください。

保証対象外の修理について:

保証内修理の場合と同様の手順で製品を送付してください。問題に関する説明を必ず記載してください。作業を開始する前に、保証対象外の部品やサービス料金に関するお見積りをお知らせしご確認いただきます。

免責条項:

Global Assistive Devices, Inc.は、いかなる場合においても、特殊、偶発的、間接的、結果的な損害に対して一切責任を負いません。ここでいう損害には器物損壊や人体損傷、プライバシーの侵害、あらゆる義務の不履行、過失、その他のあらゆる損害を含みます。また、これらの損害がどのように起因したかに関わらず、たとえ当社がこれら損害が起こり得る可能性を知らされていたとしても、

一切の責任を負いません。本免責条項はいかなる損害および損傷にも適用します。これには本製品の性能の欠陥に起因するものを含みますがそれらに限定されません。製品の選択、安全性、適正に関する責任はお客様にあります。本製品の使用または不使用により起因した状況および結果の責任はお客様にあります。Global Assistive Devices, Inc.はその一切の責任を放棄します。

GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.
Oakland Park FL 33334 USA
www.GlobalAssistive.com
www.VibraLITE.com