

Vibralite 12 Quick Reference Instruction

04/07/2011 # 1


(ITA)

VibraLITE 12

Manuale Utente
"Guida rapida"

Nota: Per IMPOSTARE una funzione qualsiasi, le CIFRE da impostare DEVONO LAMPEGGIARE. Le cifre smettono di lampeggiare se i tasti non sono premuti entro 2 minuti.


Istruzioni MODALITA' CALENDARIO

- 1) Premere il tasto "MODE" per far scorrere lo schermo Modalità Calendario. 
- 2) Tenere premuto il tasto "SET/RST" fino a che "T-ZONE" non appare in cima al quadrante e "1", "2" o "3" in fondo al quadrante lampeggia.
- 3) Usare il tasto "ST/STP" per selezionare il fuso orario che si vuole impostare.
- 4) Premere il tasto "MODE". Le cifre delle ore lampeggeranno.
- 5) Usare il tasto "ST/STP" per impostare l'ora. *Nota: Quando si usa il formato 12 ore, notare l'icona "PM".*
- 6) Premere il tasto "MODE". Le cifre dei minuti lampeggeranno.
- 7) Usare il tasto "ST/STP" per impostare i minuti.
- 8) Sempre usando il tasto "MODE" e "ST/STP" come sopra, continuare ad impostare l'ordine di visualizzazione di secondi, giorno/data del mese, mese, anno, orario su 12 o 24 ore e DATA.
- 9) Premere il tasto "SET/RST" per salvare le informazioni impostate.

Come selezionare il fuso orario

da visualizzare nella modalità calendario:


- 1) Nella modalità calendario, tenere premuto il tasto "SET/RST" fino a che "T-ZONE" appare in cima al quadrante. "1", "2" o "3" in fondo al quadrante lampeggerà.
- 2) Usare il tasto "ST/STP" per selezionare il fuso orario che si vuole visualizzare.
- 3) Premere il tasto "SET/RST" per bloccare il fuso orario selezionato.

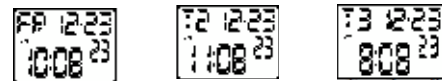

Fuso Orario 1 Fuso Orario 2 Fuso Orario 3
Visualizzazione rapida degli altri fusi orari:

Nella modalità calendario, premere il tasto "SET/STP" per far scorrere i due fusi orari non visualizzati. Il quadrante tornerà automaticamente al Fuso Orario impostato per la visualizzazione.


Istruzioni MODALITA' ALLARME:
Nota: Gli orari degli allarmi programmati si attiveranno in maniera giornaliera in base al Fuso orario per rimanere poi visualizzati nella modalità calendario.

- 1) Premere il tasto "MODE" fino a che appare "ALARM" in cima al quadrante. Dopo circa due secondi appare "ALM-01". 
- 2) Tenere premuto il tasto "SET/RST" fino a che non lampeggia il numero "01".
- 3) Usare il tasto "ST/STP" per selezionare l'allarme che si vuole impostare ("01" - "12").
- 4) Premere il tasto "MODE". Le cifre delle ore lampeggeranno.
- 5) Usare il tasto "ST/STP" per impostare l'ora. *Nota: Quando*

si usa il formato 12 ore, notare l'icona "PM".

- 6) Premere il tasto "MODE". Le cifre dei minuti lampeggeranno.
- 7) Usare il tasto "ST/STP" per impostare i minuti.
- 8) Premere il tasto "SET/RST" per salvare le informazioni programmate, O per far scorrere l'allarme successivo, premere il tasto "MODE" mentre i minuti lampeggiano e poi premere il tasto "ST/STP". Ripetere dalla fase 4 alla 8.

Impostare gli allarmi su On/Off:

- 1) Premere il tasto "MODE" fino a che appare "ALARM" in cima al quadrante. Dopo circa due secondi appare "ALM-01".
- 2) Usare il tasto "SET/STP" per selezionare l'allarme che si vuole accendere/spengere (on/off). 
- 3) Usare il tasto "ST/STP" per cambiare l'allarme selezionato. *Nota: Per disattivare o riattivare TUTTI gli allarmi, vedi le Istruzioni per la programmazione della modalità OPTION e seleziona OFF o ON per Vibrazione e Suono.*

Istruzioni cronografo:

- 1) Premere il tasto "MODE" fino a che si visualizza "CHRONO" in cima al quadrante e "0'00"00 appare in fondo. Se appare un tempo diverso da "0'00"00, premere il tasto "ST/STP" per interrompere il cronometro se è in fase di conteggio. Quando il cronometro è interrotto, premere

il tasto "SET/RST".

- 2) Premere "ST/STP" per iniziare o interrompere il conteggio. 

Tempo intermedio del cronografo:


- 1) Resettare la Visualizzazione dell'ora a zero ("0'00"00) come indicato in precedenza.
- 2) Premere "ST/STP" per iniziare il conteggio.
- 3) Premendo il tasto "SET/RST" si ferma lo schermo. Il tempo trascorso può essere registrato mentre il cronometro interno continua a contare, ma non è visualizzato.
- 4) Premendo il tasto "SET/RST" una seconda volta si visualizzerà il tempo totale trascorso. (il conteggio prosegue)

Istruzioni del CRONOMETRO:

- 1) Premere il tasto "MODE" per selezionare "TIMER1" O "TIMER 2" da visualizzare in cima al quadrante.



Timer Uno

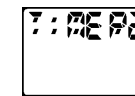

Timer Uno

Dop circa due secondi appare "TMR-1" per TIMER 1 O "TMR-2" per TIMER 2.


- 2) Tenere premuto il tasto "SET/RST" fino a che non lampeggiano le cifre dell'ora.
- 3) Usare il tasto "ST/STP" per impostare l'ora.
- 4) Premere il tasto "MODE". Le cifre dei minuti lampeggeranno.
- 5) Usare il tasto "ST/STP" per impostare i minuti.
- 6) Premere il tasto "MODE". Le cifre dei secondi lampeggeranno.
- 7) Usare il tasto "ST/STP" per impostare i minuti.

Vibralite 12 Quick Reference Instruction

04/07/2011 #2

(ITA)

- 8) Premere il tasto "MODE". "REPEAT" apparirà in cima al quadrante e "ON" o "OFF" lampeggia in fondo.
- 9) Usare il tasto "ST/STP" per selezionare REPEAT "ON" o "OFF". Quando REPEAT è su "ON", il tempo del conto alla rovescia ripete automaticamente ogni volta che il tempo raggiunge lo zero (0:00 00) e registra e visualizza fino a 99 ripetizioni.
- 10) Premere il tasto "MODE". "REMIND" apparirà in cima al quadrante e "ON" o "OFF" lampeggia in fondo.
- 11) Usare il tasto "ST/STP" per selezionare REMIND "ON" o "OFF". Quando REMIND è su "ON", un promemoria di un second avvisa a 10 minuti, a 5 minuti e di nuovo a 30 secondi prima di zero.
- 12) Premere il tasto "SET/RST" per salvare le informazioni impostate.

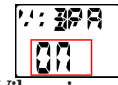

Avvio/Interruzione del cronometro conto alla rovescia:

- 1) Nella modalità conto alla rovescia selezionata, premere il tasto "ST/STP" per iniziare il conto alla rovescia.
- 2) Premere il tasto "ST/STP" per riprendere il conto alla rovescia. Viene visualizzato il tempo rimanente.

Nota: Quando l'avviso è attivato, premere due volte il tasto "ST/STP" per interrompere il conto alla rovescia.

- 3) Premere il tasto "ST/STP" per riprendere il conto alla rovescia.

Resettaggio rapido del tempo conto alla rovescia originario:

- 1) Tenere premuto il tasto "SET/RST" fino a che il tempo di conto alla rovescia precedentemente impostato appare sul quadrante.
- 2) Premere il tasto "ST/STP" per ricominciare all'ora precedentemente impostata.

Istruzioni MODALITA' OPZIONE:

- 1) Premere il tasto "MODE" fino a che appare "OPTION" in cima al quadrante. Dopo circa 2 secondi appare "VIBRA" con "ON" o "OFF" visualizzato in fondo.
- 2) Tenere premuto il tasto "SET/RST" fino a che non lampeggiano "ON" o "OFF".
- 3) Usare il tasto "ST/STP" per scegliere la vibrazione "ON" o "OFF".
- 4) Premere il tasto "MODE". "SOUND" appare in cima al quadrante. La parola "ON" o "OFF" che appare in fondo al quadrante lampeggia.

- 5) Usare il tasto "ST/STP" per scegliere il suono "ON" o "OFF".
- 6) Premere il tasto "MODE". "HOURLY" appare in cima al quadrante. La parola "ON" o "OFF" che appare in fondo al quadrante lampeggia.
- 7) Usare il tasto "ST/STP" per scegliere la sveglia oraria "ON" o "OFF". Le sveglie ORARIE impostate su



- "ON" daranno un breve promemoria ogni ora.
- 8) Premere il tasto "MODE". "BUTTON" appare in cima al quadrante. La parola "ON" o "OFF" che appare in fondo al quadrante lampeggia.
 - 9) Usare il tasto "ST/STP" per scegliere il segnale BUTTON "ON" o "OFF". I tasti di Allarme, quando impostati su "ON", identificano l'attuale impostazione di allarme (vibrazione, suono o entrambi) ogni volta in cui il tasto "MODE" o "ST/STP" è premuto.
 - 10) Premere il tasto "SET/RST" per salvare le informazioni impostate.

Visualizzazione rapida delle impostazioni modalità opzione attuale:

- 1) Premere il tasto "MODE" fino a che appare "OPTION" in cima al quadrante. Dopo circa 2 secondi appare "VIBRA" e sarà visualizzato OFF o ON.
- 2) Premere ripetutamente il tasto "ST/STP" per vedere altre impostazioni della modalità opzione attuale. ("SOUND", "HOURLY", "BUTTON")

LUCE EL: (VISUALIZZAZIONE RETROILLUMINAZIONE) Premere il tasto "LIGHT" per accendere la retroilluminazione. La luce rimane accesa per circa 3 secondi e poi si spegne automaticamente se nessun altro tasto viene premuto. La luce continua a rimanere accesa se un qualsiasi altro tasto è premuto entro 3 secondi.

Fare riferimento al Manuale Utente

per ulteriori dettagli su Istruzioni, Riparazioni e Garanzia.

GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.
Oakland Park FL 33334 USA
www.GlobalAssistive.com
www.VibraLITE.com