

VibraLITE12


MODE CALENDRIER

- ✓ Permet de programmer et d'afficher les heures, les minutes, les secondes et le calendrier (jour de la semaine), jour / date du mois, le mois et l'année de trois zones horaires différentes.
- ✓ La zone horaire 1, 2 ou 3 peut être sélectionnée pour s'afficher sur l'écran.
Remarque: Les alarmes réglées retentiront selon la zone horaire affichée sur l'écran.
- ✓ Sélectionnez le format HEURE
12 heure = Format horaire AM/PM ou
24 heure = Heure militaire
Remarque: Le format HEURE sélectionné sera automatiquement appliqué sur les trois zones horaires.
- ✓ Sélectionnez le format de la DATE (le Mois suivi du Jour/de la Date ou le Jour/la Date du mois suivis du Mois).
Remarque: Le format de la DATE sélectionné sera automatiquement appliqué sur les trois zones horaires.

Abréviations du Mode Calendrier sur l'écran:

ZONE-H = Zone horaire, hr = Heure, MM = Mois, JJ = Jour/Date, DI = Dimanche, LU = Lundi, MA = Mardi, ME = Mercredi, JE = Jeudi, VE = Vendredi, SA = Samedi.

Instructions de programmation du mode Calendrier:


- 1) Appuyez sur le bouton "MODE" pour accéder à l'écran du Mode Calendrier. 
- 2) Maintenez le bouton "SET/RST" pressé jusqu'à ce que "T-ZONE" s'affiche en haut de l'écran. Le numéro "1", "2" ou "3" en bas de l'écran clignotera.
- 3) Utilisez le bouton "ST/STP" pour sélectionner la zone horaire que vous désirez régler.
- 4) Appuyez sur le bouton "MODE". Les chiffres des heures clignoteront.
- 5) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les heures.
Remarque: Si le format horaire de 12 heures est utilisé, "PM" s'affichera dans la boîte à gauche de l'écran lorsque l'heure affichée est entre 12h et 24h. Si l'heure affichée est entre 0h et 12h (AM), la boîte sera vide
- 6) Appuyez sur le bouton "MODE". Les chiffres des minutes clignoteront.
- 7) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les minutes.
- 8) Appuyez sur le bouton "MODE". Les chiffres des secondes clignoteront.
- 9) Appuyez sur le bouton "ST/STP" pour réinitialiser les chiffres des secondes à zéro (00), si nécessaire.
- 10) Appuyez sur le bouton "MODE". Le jour/la date du mois clignoteront.
- 11) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler le jour / la date (de 1 à 31).
- 12) Appuyez sur le bouton "MODE". Le mois clignotera.
- 13) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler le mois (de 1 à 12).

- 14) Appuyez sur le bouton "MODE". Les deux derniers chiffres de l'ANNÉE clignoteront.
- 15) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler l'année.
- 16) Appuyez sur le bouton "MODE". Le nombre "12" ou "24" clignotera (12 = AM/PM en mode de 12 heures OU 24 = heure militaire de 24 heures).
- 17) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler le format horaire.
- 18) Appuyez sur le bouton "MODE". Les lettres "MM:JJ" OU "JJ:MM" clignoteront. (Le Mois est suivi du Jour / Date du mois = "MM:JJ" OU le Jour/Date du mois est suivi du Mois = "JJ:MM").
- 19) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler le format de la DATE.
- 20) Appuyez sur le bouton "SET/RST" pour sauvegarder les informations programmées.


Remarque: Lors de la procédure de réglage en Mode Calendrier, si la programmation est interrompue et qu'aucun bouton n'est pressé dans les 2 minutes qui suivent, le clignotement s'arrêtera et les réglages affichés sur l'écran seront maintenus. Terminez la programmation en répétant les étapes 1 et 2 et en accédant aux autres paramètres pour compléter les réglages si nécessaire.

Sélection de la Zone horaire à afficher dans le Mode Calendrier:


- 1) En Mode Calendrier, maintenez le bouton "SET/RST" pressé jusqu'à ce que "T-ZONE" s'affiche en haut de l'écran. Le numéro "1", "2" ou "3" en bas de l'écran clignotera.
- 2) Utilisez le bouton "ST/STP" pour sélectionner la zone horaire que vous désirez afficher.
- 3) Appuyez sur le bouton "SET/RST" pour verrouiller la zone horaire sélectionnée.

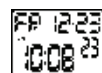

Zone horaire 1

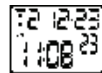

Time horaire 2

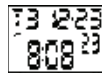

Time horaire 3

Visualisation rapide des zones horaires supplémentaires :

En Mode Calendrier, appuyez sur le bouton "ST/STP" pour accéder aux deux zones horaires non affichées. Si aucun bouton n'est pressé durant environ cinq secondes, l'écran retournera automatiquement à la zone horaire qui a été sélectionnée comme zone d'affichage.

MODE ALARME:

- ✓ Programmez jusqu'à douze alarmes quotidiennes.
- ✓ Les alarmes retentissent durant environ douze secondes avant de s'arrêter automatiquement. Les alarmes activées peuvent être arrêtées manuellement en appuyant une fois sur le bouton "ST/STP".
- ✓ Les alarmes s'activeront avec l'alerte (sonnerie, vibration ou les deux) qui a été réglée en mode OPTION.
- ✓ L'alarme programmée se déclenchera tous les jours en fonction du réglage de la zone horaire qui restera affichée en mode calendrier.

Abréviation du Mode Alarme sur l'écran :

ALM = Alarme

Instructions de programmation du mode Alarme:

- 1) Appuyez sur le bouton "MODE" jusqu'à ce que "ALARME" s'affiche en haut de l'écran. Après environ deux secondes, "ALM-01" s'affichera. 
- 2) Maintenez le bouton "SET/RST" pressé jusqu'à ce que le numéro "01" clignote. Alarme activée
- 3) Utilisez le bouton "ST/STP" pour sélectionner l'alarme que vous désirez ("01" à "12").
- 4) Appuyez sur le bouton "MODE", les chiffres des heures clignoteront.
- 5) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les heures.
- 6) Appuyez sur le bouton "MODE". Les chiffres des minutes clignoteront.
- 7) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les minutes.
- 8) Appuyez sur le bouton "SET/RST" pour sauvegarder les informations programmées, OU pour accéder à l'alarme suivante, appuyez sur le bouton "MODE" alors que les chiffres des minutes clignotent puis appuyez sur le bouton "ST/STP". Répétez les étapes 4 à 8.

Remarque: Lors de la procédure de réglage en Mode Alarme, si la programmation est interrompue et qu'aucun bouton n'est pressé dans les 2 minutes qui suivent, le clignotement s'arrêtera et les réglages affichés sur l'écran seront maintenus. Si aucun bouton n'est pressé avant les 2 minutes suivantes, l'écran retournera automatiquement en Mode Calendrier.

Activer / désactiver les alarmes:

- 1) Appuyez sur le bouton "MODE" jusqu'à ce que "ALARME" s'affiche en haut de l'écran. Après environ deux secondes, "ALM-01" s'affichera.
- 2) Utilisez le bouton "SET/RST" pour sélectionner l'alarme que vous désirez activer / désactiver.
- 3) Utilisez le bouton "ST/STP" pour changer l'alarme sélectionnée.

Remarque: Lorsque l'alarme est activée, l'heure d'alarme s'affichera avec "On" (activée) dans la seconde boîte sur le côté droit de l'écran.



Lorsque l'alarme est désactivée, "OFF" (désactivé) s'affiche en bas de l'écran.

Remarque: Pour désactiver ou réactiver TOUTES les alarmes, reportez-vous aux Instructions de programmation du Mode OPTION et sélectionnez OFF ou ON pour activer ou désactiver une alarme par vibrations ou sonore.

MODE CHRONOGRAPHE (CHRONOMÈTRE):

- ✓ Le chronographe peut compter jusqu'à 23 heures, 59 minutes et 59 secondes.
- ✓ Permet de chronométrer simplement, d'arrêter

le compte momentanément et d'enregistrer les temps de passage.

Abréviation du Mode Chronographe sur l'écran: CHRONO = Chronographe

Instructions d'utilisation du Chronographe :


- 1) Appuyez sur le bouton "MODE" jusqu'à ce que "CHRONO" s'affiche en haut de l'écran. Après environ deux secondes, "0'00"00 s'affichera en bas de l'écran Si une heure autre que "0'00"00 est affichée, appuyez sur le bouton "ST/STP" pour arrêter le chronomètre en marche. Une fois que le chronomètre est arrêté, appuyez sur le bouton "SET/RST". 
- 2) Appuyez sur le bouton "ST/STP" pour démarrer le chronomètre. L'icône est située dans la boîte au milieu de l'écran et commencera à clignoter. 
- 3) Appuyez sur le bouton "ST/STP" pour arrêter le chronomètre et enregistrer le temps de passage.
- 4) Appuyez sur le bouton "ST/STP" pour redémarrer le chronomètre.

Fonctionnement des temps de passage :

- 1) Réinitialisez l'affichage à zéro ("0'00"00) comme indiqué précédemment.
- 2) Appuyez sur le bouton "ST/STP" pour démarrer le chronomètre.
- 3) Appuyez sur le bouton "SET/RST" pour bloquer l'écran. La durée écoulée peut être enregistrée alors que le chronomètre continue de fonctionner, sans être affiché.
- 4) Appuyez une seconde fois sur le bouton "SET/RST" pour afficher la durée écoulée totale (le chronomètre continue de fonctionner).

Remarque: Le Mode Chronographe reste affiché sur l'écran. Appuyez sur le bouton "MODE" pour accéder au Mode calendrier.

MODE MINUTEUR:

- ✓ Permet de programmer un compte à rebours jusqu'à 23 heures, 59 minutes et 59 secondes sur deux minuteurs. Lorsque le compte à rebours atteint zéro (0:00 00) l'(les) alerte(s) réglée(s) s'activera (ont) et s'arrêtera(ont) automatiquement. La durée de l'alerte du Minuteur 1 est de cinq secondes. La durée de l'alerte du Minuteur 2 est de dix secondes. L'alerte activée peut être arrêtée manuellement en appuyant une fois sur le bouton "ST/STP".
- ✓ L'alerte peut être réglée sous forme de sonnerie, vibration ou les deux (la sonnerie / vibration peut être activée/désactivée en mode OPTION).
- ✓ L'option de RÉPÉTITION peut être réglée sur "ON (ACTIVÉE) ou "OFF" (DÉSACTIVÉE). Lorsque l'option de RÉPÉTITION est réglée sur "ON (ACTIVÉE), la durée programmée du compte à rebours se répétera automatiquement à chaque fois qu'il atteindra zéro (0:00 00). Le nombre de répétitions sera affiché en haut de l'écran (jusqu'à 99 puis de  Répétition activée

nouveau à partir de 0).

Remarque: Si un compte à rebours de moins de trente secondes est réglé pour être répété, la durée de l'alerte changera à environ une seconde avant d'arrêter automatiquement.


✓ L'option de RAPPEL peut être réglée sur "ON" (ACTIVÉE) ou "OFF" (DÉSACTIVÉE). Lorsque l'option de RAPPEL est activée, une alerte d'une durée d'environ d'une seconde retentira 10 minutes avant zéro, 5 minutes avant zéro et de nouveau 30 secondes avant zéro.

Abréviations du Mode Minuteur sur l'écran:

TMR = Minuteur, REP = Répétition

Instructions de Programmation du Minuteur:

1) Appuyez sur le bouton "MODE" pour sélectionner le "MINUTEUR 1" ou le "MINUTEUR 2" qui s'affichera en haut de l'écran.

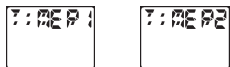

Après environ deux secondes, "MTR-1" pour le MINUTEUR 1 ou "MTR-2" pour MINUTEUR 2 s'affichera.

- Maintenez le bouton "SET/RST" pressé jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent.
- Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les heures.
- Appuyez sur le bouton "MODE", les chiffres des minutes clignoteront.
- Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les minutes.
- Appuyez sur le bouton "MODE". Les chiffres des secondes clignoteront.
- Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les secondes.
- Appuyez sur le bouton "MODE". "REPEAT" (RÉPÉTITION) s'affichera en haut de l'écran et "ON" ou "OFF" clignotera en bas de l'écran.
- Utilisez le bouton "ST/STP" pour activer "ON" ou désactiver "OFF" la RÉPÉTITION.
- Appuyez sur le bouton "MODE". "REMIND" (RAPPEL) s'affichera en haut de l'écran et "ON" ou "OFF" clignotera en bas de l'écran.
- Utilisez le bouton "ST/STP" pour activer "ON" ou désactiver "OFF" le RAPPEL.
- Appuyez sur le bouton "SET/RST" pour sauvegarder les informations programmées.



Remarque: Lors de la procédure de réglage en Mode Minuteur, si la programmation est interrompue et qu'aucun bouton n'est pressé dans les 2 minutes qui suivent, le clignotement s'arrêtera et les réglages affichés sur l'écran seront maintenus. Terminez la programmation en répétant l'étape 2 et continuez si nécessaire. Le compte à rebours reste sur l'affichage. Appuyez sur le bouton "MODE" pour accéder au Mode Calendrier.

Démarrage / Arrêt du compte à rebours du Minuteur:

1) En Mode Minuteur, appuyez sur le bouton

"ST/STP" pour démarrer le compte à rebours. L'icône du minuteur située dans la boîte à droite de l'écran clignotera.

- Appuyez sur le bouton S1 pour arrêter le minuteur. La durée restante s'affichera.
Remarque: Lorsque l'option de RÉPÉTITION est activée en mode minuteur, appuyez deux fois sur le bouton "ST/STP" pour arrêter le compte à rebours.
- Appuyez sur le bouton "ST/STP" pour reprendre le compte à rebours.

Réinitialisation rapide de la durée originale du Minuteur :

- Maintenez le bouton "SET/RST" jusqu'à ce que la durée programmée précédemment du compte à rebours s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur le bouton "ST/STP" pour redémarrer le compte à rebours à partir de la durée réglée précédemment.




MODE OPTION:

- ✓ Les alertes par VIBRATION et SONORE peuvent être activées "ON" ou désactivées "OFF". Les alertes peuvent être activées en mode Alarme, en mode Minuteur, en mode Carillon horaire et en appuyant sur le bouton d'alerte.
- ✓ Lorsque le carillon HORAIRE est activé, un bip sonore retentira toutes les heures (alerte par vibration, sonore ou les deux). **Remarque:** Le carillon horaire est basé sur le réglage de la zone horaire affichée en Mode Calendrier.
- ✓ Le bouton d'alerte, s'il est activé, identifier l'alerte en cours (vibration, sonore ou les deux) à chaque fois que le bouton "MODE" ou "ST/STP" est pressé.

Abréviation du Mode Option sur l'écran:

VIBRA = Vibration

Instructions de Programmation du Mode Option :

- Appuyez sur le bouton "MODE" jusqu'à ce que "OPTION" s'affiche en haut de l'écran. Après environ deux secondes, "VIBRA" s'affichera. Le mot "ON" (ACTIVÉ) ou "OFF" (DÉSACTIVÉ) s'affichera en bas de l'écran.  Vibration ACTIVÉE
- Maintenez le bouton "SET/RST" pressé jusqu'à ce que "ON" ou "OFF" commence à clignoter.
- Utilisez le bouton "ST/STP" pour activer ou désactiver l'alerte par vibration.
- Appuyez sur le bouton "MODE". "SOUND" (SONORE) s'affichera en haut de l'écran. Le mot "ON" (ACTIVÉ) ou "OFF" (DÉSACTIVÉ) affiché en bas de l'écran clignotera. 
- Utilisez le bouton "ST/STP" pour activer ou désactiver l'alerte sonore. 
- Appuyez sur le bouton "MODE". "HOURLY" (HORAIRE) s'affichera en haut de l'écran. Le mot "ON" (ACTIVÉ) ou "OFF" (DÉSACTIVÉ) affiché en bas de l'écran clignotera.
- Utilisez le bouton "ST/STP" pour activer ou

désactiver le carillon horaire.

- Appuyez sur le bouton "MODE". "BUTTON" (BOUTON) s'affichera en haut de l'écran. Le mot "ON" (ACTIVÉ) ou "OFF" (DÉSACTIVÉ) affiché en bas de l'écran clignotera.
- Utilisez le bouton "ST/STP" pour activer ou désactiver la tonalité sonore des boutons.
- Appuyez sur le bouton "SET/RST" pour sauvegarder les informations programmées.

Remarque: Lors de la procédure de réglage en Mode Option, si la programmation est interrompue

et qu'aucun bouton n'est pressé dans les 2 minutes qui suivent, le clignotement s'arrêtera et les réglages affichés sur l'écran seront maintenus. Si aucun bouton n'est pressé avant les 2 minutes suivantes, l'écran retournera automatiquement en Mode Calendrier.

Visualisation rapide du réglage en cours du Mode Option :

- Appuyez sur le bouton "MODE" jusqu'à ce que "OPTION" s'affiche en haut de l'écran. Après environ deux secondes, "VIBRA" s'affichera. Si l'option de vibration est activée, "ON" s'affichera en bas de l'écran. Si l'option est désactivée, "OFF" sera affiché.
- Appuyez de manière répétée sur le bouton "ST/STP" pour visualiser les autres réglages du mode Option en cours ("SONORE", "HORAIRE", "BOUTON")

RÉTRO-ÉCLAIRAGE (ÉCLAIRAGE DE L'AFFICHAGE):

Appuyez sur le bouton "LIGHT" pour activer le rétro-éclairage. L'éclairage restera allumé durant environ 3 secondes puis s'éteindra automatiquement si aucun autre bouton n'est pressé. L'éclairage continuera si un autre bouton est pressé dans les 3 secondes qui suivent.

PILE:

Une pile en lithium de 3 volts de type CR2032 est nécessaire. La pile doit être remplacée par une personne qualifiée pour maintenir l'étanchéité de la montre. La durée de vie de la pile varie selon la fréquence d'utilisation de la fonction de vibration et du rétro-éclairage.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES:

Les montres VibraLITE ne sont pas conçues pour être portées en nageant, en plongeant ou sous la douche. Ne tentez pas d'ouvrir la montre pour remplacer la pile vous-même, ou pour toute autre raison, car cette procédure doit être effectuée par un technicien qualifié dans des conditions contrôlées.

Nous vous recommandons de conserver votre facture originale comme preuve de date d'achat.

RÉPARATION :

Avant d'envoyer votre montre pour une réparation, faites vérifier la pile et / ou essayez de réinitialiser la montre en appuyant sur les quatre boutons en même temps jusqu'à ce que l'écran s'efface et soit réinitialisé.

GARANTIE LIMITÉE À UN AN:

Votre montre VibraLITE 12 est garantie exempte de

défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie est limitée et couvre les fonctions de la montre uniquement. Cette garantie ne s'applique pas à la pile, au bracelet, au boîtier ou aux cristaux car ces articles sont soumis à l'usure d'un usage quotidien.

La garantie sera annulée si la montre a été modifiée, altérée, maltraitée ou soumise à des conditions extrêmes pour lesquelles elle n'a pas été conçue, ou si elle a été réparée autrement que par un centre d'entretien qualifié.

À sa discrétion, GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC. pourra choisir de remplacer l'unité, plutôt que de la réparer. Au cours de la période de garantie, retournez la montre, avec la preuve d'achat datée, dans un emballage sécurisé, assuré et avec les frais d'envoi payés d'avance. Aucun forfait remboursement ne sera accepté. Veuillez inclure une note décrivant le service requis, votre adresse et 9,95 \$ (chèque, mandat, Visa, Master Card, American Express ou Discover) pour les frais d'expédition et de manutention aux États-Unis. Pour les autres pays, veuillez nous contacter pour les tarifs.

HORS SERVICE DE GARANTIE:

Suivez la même procédure pour nous expédier le produit comme vous le feriez pour un service sous garantie. N'oubliez pas d'inclure une description du problème. Avant que tout travail soit effectué, un devis vous sera soumis à votre approbation pour toutes les pièces et main d'œuvre qui ne sont pas couverts par la garantie.

CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ:

En aucun cas, Global Assistive Devices, Inc. ne pourra être tenu responsable pour tout dommage spécial, accidentel, indirect ou consécutif incluant, mais ne limitant pas, les dommages et intérêts pour toute perte de bien, blessure, perte de vie privée, non-respect des droits, négligence et toute autre perte que ce soit, peu importe la cause, même si Global a été avisé de la possibilité de tels dommages.

Cette exclusion de responsabilité s'applique à tout dommage ou blessure, y compris mais non limité à ceux causés par un défaut de performance du produit. Toute responsabilité de sélection, de sécurité et de fiabilité des produits repose sur le consommateur. Les circonstances ou les conséquences découlant de ou en aucune façon liées à l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser nos produits est sous la responsabilité du consommateur. Global Assistive Devices, Inc. ne peut être tenu responsable en aucune façon.

GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.
Oakland Park FL 33334 USA
www.GlobalAssistive.com
www.VibraLITE.com