

VibraLITE 3

Fonctions de la montre

Double affichage de l'heure

Affichage digital (au choix 12 ou 24 heures). Le deuxième affichage permet l'utilisation de la montre par exemple en voyage dans différents fuseaux horaires.

Deux horaires d'alarme

Réveil et/ou rappel journalier de l'heure réglée.

Signal horaire

Court signal à chaque heure précise.

Illumination du display

Illumination automatique du display


Le display s'illumine automatiquement lors de mouvements énergiques du poignet.

Chronomètre

Affichage jusqu'au centième de seconde.

Minuterie avec compte à rebours et répétitions

Idéale pour durées répétitives (en médecine, au sport etc.). Réglage maximum 23 h 59 min 59 sec.

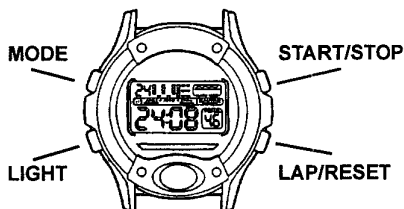

Fonction reset (remise à zéro)

Maintenez enfoncées les touches **MODE**, **START/STOP** et **LAP/RESET** jusqu'à extinction de l'affichage sur le display. Relâchez ensuite les touches. La montre indique alors 12:00 A.M. et toutes les fonctions sont inactives. La date indique le 1er janvier et le display indique MO pour lundi.

Affichages du display

La montre-bracelet **VibraLITE 3** a six affichages différents.

Heure/date



Deuxième horaire



Deuxième alarme



Chronomètre



Première alarme



Minuterie avec compte à rebours



En appuyant sur la touche **MODE**, on sélectionne les différents affichages du display dans l'ordre cité ci-dessus.

Pour vous familiariser avec les différents affichages du display ainsi qu'avec leurs symboles, pressez successivement sur la touche **MODE**.

Réglage de l'heure et de la date

1. Vérifiez tout d'abord que le display indique l'heure et la date. Appuyez, si nécessaire, plusieurs fois sur la touche **MODE** jusqu'à l'obtention de l'affichage heure/date.

2. Maintenez enfoncée la touche **LAP/RESET** jusqu'au clignotement des secondes. En appuyant sur la touche **START/STOP**, les secondes sont remises à zéro (00 sur le display).

3. En pressant sur la touche **MODE**, les heures clignotent. Réglez les heures en appuyant sur la touche **START/STOP**.

Attention : Si le mode d'affichage de 12 heures est actif, un petit symbole (PM) apparaît à gauche du display pour l'après-midi et le soir. Tenez-en compte lors du réglage des heures.

Symbole PM



4. En pressant à nouveau sur la touche **MODE**, les minutes clignotent. Réglez les minutes en appuyant sur la touche **START/STOP**.

5. Une pression supplémentaire sur la touche **MODE** active le réglage de l'affichage des 12 ou 24 heures. Réglez le mode d'affichage des 12 ou 24 heures en appuyant sur la touche **START/STOP**.

6. En pressant maintenant sur la touche **MODE**, le jour du mois apparaît en clignotant en haut à gauche du display. Réglez le jour du mois de 1 à 31 en appuyant sur la touche **START/STOP**.

7. Une autre pression sur la touche **MODE** active l'affichage du mois. Réglez le mois de 1 à 12 en appuyant sur la touche **START/STOP**.

8. Une autre pression sur la touche **MODE** active l'affichage du jour de la semaine. Réglez le jour de la semaine en appuyant sur la touche **START/STOP**.

9. En appuyant sur la touche **LAP/RESET** la procédure de réglage de l'heure est terminée.

La procédure de réglage de l'heure peut être interrompue à tout moment en appuyant sur la touche **LAP/RESET**.

Réglage des alarmes

Procédez comme suit pour le réglage des deux heures d'alarme:

1. Appuyez sur la touche **MODE** aussi souvent que nécessaire jusqu'à l'affichage de la première (A1) ou la deuxième heure (A2) d'alarme.

2. Maintenez enfoncée la touche **LAP/RESET** jusqu'au clignotement des heures. Réglez l'heure d'alarme en appuyant sur la touche **START/STOP**. Si la **VibraLITE 3** est en mode d'affichage de 12 heures, vérifiez que le symbole PM apparaisse sur le display.

3. En pressant à nouveau sur la touche **MODE**, les minutes clignotent. Réglez les minutes pour l'alarme en appuyant sur la touche **START/STOP**.

4. En appuyant sur la touche **LAP/RESET**, la procédure de réglage de l'alarme est terminée. Au-dessus de l'heure d'alarme choisie, le symbole ALM1 ou ALM2 sera souligné. Cela signifie que l'alarme est active.

Vérifiez qu'un mode d'alarme est actif (voir chapitre suivant).



Alarme 1

Alarme 2

Mise en marche/arrêt de l'alarme de réveil et du signal horaire

Pour mettre en ou hors service la première alarme (A1), celle-ci doit être affichée sur le display. De même pour la deuxième alarme (A2). En même temps le signal horaire (chime) peut être mis en ou hors service.

1. Appuyez successivement sur la touche **MODE** jusqu'à ce que l'affichage de l'alarme souhaitée apparaisse sur le display.

2. Trois réglages sont possibles par pression de la touche **START/STOP** (ALM1, chime, ALM1 et chime). Si, par exemple, les symboles ALM1 et chime sont soulignés sur le display, la première alarme et le signal horaire sont actifs.

Contrairement à l'alarme de réveil, le signal horaire (chime) peut être mis en ou hors service pour les deux alarmes.



Signal horaire (chime)

Si le signal horaire est actif, une courte vibration et/ou un bip sonore se déclencheront à chaque heure précise.