



RELOJ VIBRATORIO equipado con:

Alarma vibratoria discreta y eficaz

Alarma acústica opcional

Función de cuenta atrás con reinicio automático

Permite especificar un intervalo de segundos, minutos u horas para la cuenta atrás. Especialmente útil para no olvidar tratamientos médicos o tomas de medicación, para coordinar presentaciones o procedimientos, para recordar horarios de parking, para cocinar, etc. Al término del intervalo fijado, se reinicia automáticamente la cuenta atrás.

Luz de fondo electroluminiscente

Para ver la pantalla de noche

Segundo reloj

Ideal cuando se viaja a otros husos horarios

Dos alarmas

Para actividades diarias: despertador, repetición de despertador (*snooze*), toma de medicación, etc.

Opción de alerta / señal horaria

Reloj de 12 o de 24 horas

Cronómetro

MODO INICIO - PARO
LUZ LAP - PUESTA A
CERO CERO

ANTES DE EMPEZAR

Pulse los botones **Modo**, **Inicio-Paro** y **Lap-Puesta a cero** simultáneamente hasta que se borre toda la información de la pantalla. Suelte los botones. La hora habrá quedado fijada en las 12.00 AM y

todas las funciones (alarmas, señales horarias, funciones acústicas y vibratorias) se habrán desactivado. En la pantalla aparecerán el día 1 de enero y la abreviatura MO, que corresponde a *Monday* (lunes).

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Este reloj dispone de seis modos de funcionamiento:

- 1) Reloj y calendario
- 2) Cronómetro
- 3) Segundo reloj
- 4) Primera alarma
- 5) Segunda alarma
- 6) Cuenta atrás

Para pasar de un modo de funcionamiento a otro, basta con pulsar el botón **Modo** cuantas veces sea necesario. Los modos se suceden a cada pulsación en el orden indicado anteriormente.

Para familiarizarse con los modos de funcionamiento y sus símbolos, observe las sucesivas pantallas pasando de un modo a otro con el botón Modo.

CONFIGURACIÓN INICIAL DE LA FECHA Y LA HORA

(Para que la configuración de las alarmas sea fiable, antes es imprescindible configurar la fecha y la hora.)

Durante la configuración de la fecha y la hora, los elementos que van a configurarse se suceden en el orden siguiente: segundos, horas, minutos, 12/24 h, fecha, mes, día de la semana. Tales elementos **solo** podrán modificarse cuando estén parpadeando. La hora dejará de parpadear si no se pulsa ningún botón durante dos minutos. Cuando alguno de los elementos parpadea, no es posible pasar a otro modo de funcionamiento. Para detener el parpadeo, pulse el botón **Lap-Puesta a cero**.

1. Pulse el botón **Modo** repetidamente hasta que aparezca en la pantalla el modo **1) Reloj y calendario**.

2. Mantenga pulsado el botón **Lap-Puesta a cero** hasta que los dígitos correspondientes a los segundos empiecen a **parpadear**. Pulse el botón **Inicio-Paro** para asignar el valor 00 a los segundos.
3. Pulse el botón **Modo**. Empezarán a parpadear los dígitos de las horas. Pulse el botón **Inicio-Paro** cuantas veces sea necesario hasta configurar la hora correcta. Si el reloj está configurado en modo 12 horas, aparecerá junto al valor horario, en el extremo superior izquierdo, la indicación PM. Conviene cerciorarse de que la indicación PM se asigne efectivamente a las horas de la tarde o de la noche (previas a la medianoche).

Indicación PM

4. Pulse de nuevo el botón **Modo** para pasar a los dígitos correspondientes a los minutos, que empezarán a parpadear. Pulse el botón **Inicio-Paro** cuantas veces sea necesario hasta encontrar el valor deseado.
5. Pulse el botón **Modo** y empezará a parpadear el modo 12 h. Si desea seleccionar el modo 24 horas, presione el botón **Inicio-Paro** una vez y aparecerá en la pantalla la indicación de 24 h.
6. Pulse el botón **Modo** para pasar a la fecha. El número 1 empezará a parpadear en la esquina superior izquierda de la pantalla. Pulse el botón **Inicio-Paro** cuantas veces sea necesario hasta dar con el día del mes correspondiente (1-31).
7. Pulse el botón **Modo** para pasar al mes. El número 1 empezará a parpadear en la pantalla. Pulse el botón **Inicio-Paro** cuantas veces sea necesario hasta dar con el número del mes en curso (p. ej., 6 para junio, 9 para septiembre, etc.).
8. Pulse el botón **Modo** para configurar el día de la semana. La indicación **MO** (*Monday*; lunes) empezará a

parpadear. Pulse el botón **Inicio-Paro** cuantas veces sea necesario hasta dar con el día de la semana en cuestión (p. ej., **TU** para *Tuesday* (martes), **TH** para *Thursday* (jueves), etc.).

9. En cuanto haya configurado todos los valores, presione el botón **Lap-Puesta a cero** y la pantalla dejará de parpadear.

CONFIGURACIÓN DE LAS ALARMAS

*(El procedimiento de configuración es el mismo para **ambas** alarmas)*

1. Pulse el botón **Modo** repetidamente para pasar del modo de funcionamiento **Primera alarma (A1)** a **Segunda alarma (A2)** y viceversa.
2. Mantenga pulsado el botón **Lap-Puesta a cero** hasta que los dígitos correspondientes a la hora empiecen a parpadear. Pulse el botón **Inicio-Paro** cuantas veces sea necesario hasta dar con la hora deseada. *Nota: en el Modo 12 horas, no olvide utilizar el indicador PM para configurar la hora correctamente.*
3. Presione el botón **Modo** para pasar a los minutos, que empezarán a parpadear. Pulse el botón **Inicio-Paro** cuantas veces sea necesario hasta dar con los minutos correctos.
4. A continuación, pulse el botón **Lap-Puesta a cero**. La pantalla dejará de parpadear y aparecerá el icono que informa de que la alarma se ha configurado. *Cuando se ha configurado la alarma A1, el icono aparece junto a la indicación PM bajo la A. Cuando se ha configurado la alarma A2, el icono aparece en la pantalla junto al icono A1.*

Alarma 1

Alarma 2

ACTIVAR Y DESACTIVAR LA SEÑAL HORARIA

1. Pulse el botón **Modo** repetidas veces para seleccionar la **Primera alarma (A1)** o la **Segunda alarma (A2)**.

2. Pulse el botón **Inicio-Paro** cuantas veces sea necesario hasta que aparezca en la pantalla el indicador de señal horaria (junto a la indicación **A1 2**). La señal horaria está activada cuando aparece el icono correspondiente en la pantalla. Si no es así, es que no está activada.

Señal horaria

ACTIVAR Y DESACTIVAR LAS ALARMAS

Nota: para activar o desactivar la primera alarma, debe encontrarse en el modo A1 y para activar o desactivar la segunda alarma, debe encontrarse en el modo A2.

Pulse el botón **Modo** repetidas veces hasta que aparezca en pantalla la alarma que desee activar o desactivar, esto es, la **primera (A1)** o la **segunda (A2)**. Pulse el botón **Inicio-Paro** repetidas veces para pasar del modo de alarma activada (señal horaria) al de alarma desactivada. La alarma está activada cuando aparece el icono correspondiente en la pantalla. Si no es así, eso significa que está desactivada (véase la ilustración anterior).

ACTIVAR Y DESACTIVAR LA FUNCIÓN DE VIBRACIÓN Y DE SEÑAL ACÚSTICA

1. Pulse el botón **Modo** repetidas veces hasta entrar en el modo de **Reloj y calendario**.
2. Pulse el botón **Inicio-Paro** cuantas veces sea necesario para pasar de un valor de configuración al siguiente. Cuando una función esté activada, el icono correspondiente aparecerá destacado en la esquina superior derecha de la pantalla. El orden de los valores de configuración es el siguiente: vibración activada, señal acústica activada, vibración y señal acústica activadas, vibración y señal acústica desactivadas. Seleccione el valor de configuración que desee de los cuatro posibles. Esta

configuración podrá modificarse en cualquier momento volviendo a los pasos 1 y 2.

Vibración activada

Señal acústica activada

La alarma se detendrá aproximadamente al cabo de unos 20 segundos. Si desea pararla antes, bastará con pulsar cualquier botón.

***Nota:** para comprobar la configuración en cualquier momento, pulse el botón **Modo**. Cada pulsación, dará como respuesta una señal vibratoria, acústica o ambas según la configuración vigente.*

FUNCIÓN DE CUENTA ATRÁS

1. Pulse el botón **Modo** cuantas veces sea necesario hasta llegar al modo **Cuenta atrás (TR)**.
2. Mantenga pulsado el botón **Lap-Puesta a cero** hasta que los dígitos correspondientes a los segundos correspondientes a los segundos empiecen a parpadear. Pulse el botón **Inicio-Paro** hasta encontrar el valor deseado. Se puede seleccionar un valor entre 0 y 59 segundos. Si no quiere configurar los segundos, vaya directamente al paso número 3.
3. Pulse el botón **Modo** para pasar a las horas, cuyos dígitos empezarán a parpadear. Pulse el botón **Inicio-Paro** cuantas veces sea necesario hasta encontrar el valor deseado. Se puede seleccionar un valor entre 0 y 23.
4. Pulse de nuevo el botón **Modo** para pasar a los minutos, que empezarán a parpadear. Pulse el botón **Inicio-Paro** cuantas veces sea necesario hasta encontrar el valor deseado. Puede seleccionar un valor entre 0 y 59.
5. Cuando termine, pulse el botón **Lap-Puesta a cero**. La pantalla dejará de parpadear.

Para cambiar el intervalo fijado en la función de cuenta atrás, consulte el apartado **FUNCIÓN DE CUENTA ATRÁS** y siga las instrucciones.

INICIO DE LA CUENTA ATRÁS

Una vez haya configurado el intervalo de cuenta atrás, pulse el botón **Inicio-Paro** y empezará la cuenta atrás. Para detenerla, pulse de nuevo el botón **Inicio-Paro**. Si lo pulsa una tercera vez, la cuenta atrás se reanudará desde el punto en que se detuvo.

Nota: cuando se haya configurado un intervalo de tiempo superior a 10 diez minutos, saltará una breve señal de aviso cuando queden 10 minutos y cuando queden 5 minutos.

REINICIO AUTOMÁTICO DE LA CUENTA ATRÁS

En cuanto llegue a cero, la cuenta atrás se iniciará de nuevo automáticamente a partir del tiempo configurado. Si no quiere que la cuenta atrás vuelva a empezar inmediatamente, pulse el botón **Inicio-Paro** dos veces si la alarma está activada. Si la alarma no está activada, pulse el botón una sola vez para detener la cuenta atrás.

Para reanudar en cualquier momento la cuenta atrás configurada, pulse el botón **Inicio-Paro** desde el modo de **Cuenta atrás (TR)**.

CUENTA ATRÁS CON REINICIO AUTOMÁTICO Y PAUSAS INTERMEDIAS

Cuando la cuenta atrás llega a cero, se activa la alarma y se inicia de nuevo la cuenta atrás a partir del tiempo configurado. Si lo desea, puede cancelar la cuenta atrás y volver a empezar partiendo del total de tiempo original. Para ello, mantenga pulsado el botón **Lap-Puesta a cero** durante unos 2 o 3 segundos hasta que los dígitos correspondientes al intervalo de cuenta atrás original parpaddeen. Pulse el botón **Lap-Puesta a cero** una vez y los dígitos dejarán de parpadear (si no se pulsara dicho botón, los dígitos dejarían de parpadear automáticamente al cabo de 2 minutos.)

Para activar el inicio de la cuenta atrás cuando así lo desee, pulse el botón **Inicio-Paro** una vez.

USO DEL CRONÓMETRO

1. Pulse el botón **Modo** cuantas veces sea necesario hasta que aparezca en la pantalla el modo **Cronómetro**.
2. Para poner en marcha el cronómetro, pulse el botón **Inicio-Paro**. El cronómetro empezará a contar el tiempo y el icono correspondiente parpadeará en la parte superior de la pantalla).

Para detener el cronómetro, pulse el botón **Inicio-Paro**. Si vuelve a pulsar este botón, el cronómetro volverá a ponerse en marcha en el punto en que se detuvo la última vez. Con esta función se pueden cronometrar hasta 23 horas, 59 minutos y 59,99 segundos. Las horas totales cronometradas aparecen en la esquina superior izquierda de la pantalla. Para poner el cronómetro a cero, pulse el botón **Lap-Puesta a cero** cuando no esté cronometrando.

Función dual: hora y cronómetro

1. Ponga en marcha el cronómetro pulsando el botón **Inicio-Paro**. Empezará el cronometraje.
2. Pulse el botón **Lap-Puesta a cero**. El cronometraje continuará a pesar de que los tiempos no aparecerán en la pantalla. El parpadeo del icono situado en lo alto de la pantalla le indicará que el cronómetro está en marcha.
3. Pulse de nuevo el botón **Lap-Puesta a cero** y aparecerá en la pantalla el tiempo total cronometrado.
4. Para poner el cronómetro a cero, pulse primero el botón **Inicio-Paro** y a continuación el botón **Lap-Puesta a cero**.

CONFIGURACIÓN DEL SEGUNDO RELOJ

1. Pulse el botón **Modo** repetidamente hasta que aparezca la pantalla del **Segundo reloj (T2)**.
2. Mantenga pulsado el botón **Lap-Puesta a cero** hasta que los dígitos correspondientes a la hora empiecen a parpadear.

3. Pulse el botón **Inicio-Paro** cuantas veces sea necesario hasta dar con la hora deseada. (en la modalidad de 12 horas, no olvide utilizar el indicador PM con las horas de tarde y noche - previas a la medianoche).
4. En cuanto haya encontrado la hora correcta, pulse el botón **Lap-Puesta a cero**. **Nota:** en el segundo reloj, sólo se pueden configurar las horas (los minutos y los segundos serán los mismos que en el reloj principal).

ILUMINACIÓN DE LA PANTALLA

Para iluminar la pantalla LCD, basta con presionar el botón **Luz**. La pantalla se iluminará durante unos 3 segundos antes de apagarse automáticamente. La luz de fondo electroluminiscente parpadeará siempre que se active una alarma.

ACERCA DE LA PILA

Este reloj utiliza una pila de litio estándar de tipo CR2032 o equivalente. La duración de la pila variará en función de la frecuencia con que se utilice la luz electroluminiscente y la función de vibración. Con el fin de preservar la estanqueidad del reloj, las pilas deberá cambiarlas una persona cualificada.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

GLOBAL no asume responsabilidad alguna en relación a posibles contratiempos u omisiones que tengan que ver con la toma de medicación o con otros avisos o recordatorios para los que se utilice el reloj.

REPARACIONES

Toda operación de reparación de este reloj deberá dejarse en manos de personas cualificadas. El usuario no debe intentar repararlo por sí mismo. Los equipos que requieran reparación se remitirán a:
Global Assistive Devices Inc.
4950 North Dixie Highway,
Fort Lauderdale FL EEUU 33334
Antes de enviar el equipo para su reparación, solicite comprobación de la

pila e intente poner el reloj a cero pulsando los botones **Modo**, **Inicio-Paro** y **Lap-Puesta a cero** simultáneamente hasta que se borre toda la información de la pantalla.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

El reloj Vibra LITE 3 le ofrece un año de garantía, a contar partir de la fecha de compra, que cubre defectos de material y mano de obra. No obstante, la presente garantía es limitada y cubre exclusivamente el reloj en sí mismo, es decir que no es extensible a la pila, la correa del reloj ni a ningún equipo o pieza que haya sido objeto de utilización indebida, de negligencia o de un accidente. Esta garantía quedará anulada en caso de que el reloj haya sido modificado, alterado o reparado por personas otras que las de un centro de reparación cualificado. GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC. puede optar, a su entera discreción, por cambiar el reloj por otro en vez de repararlo. Durante el periodo de garantía, devuelva el reloj junto con un comprobante de compra debidamente fechado en un paquete seguro y con todos los gastos de envío ya pagados. No se aceptará ningún envío contra reembolso. Junto con el reloj, envíe una nota en la que se indique la reparación necesaria y adjunte el importe de 8,50 USD (cheque, giro postal, Visa, MasterCard, American Express o Discover) para cubrir los gastos de tramitación y envío dentro de EEUU. En caso de hallarse en otro país, póngase en contacto con nosotros y le indicaremos las tarifas.

Copyright:

GLOBAL

ASSISTIVE DEVICES, INC.
4950 North Dixie Highway
Fort Lauderdale Florida USA
33334-3947